


## GUIDE RAPIDE D'UTILISATION



Allumer et  
programmer  
l'analyseur.



Avant ouverture des tubes,  
s'assurer que les liquides ou  
lyophilisats qu'ils contiennent  
sont bien au fond des tubes.

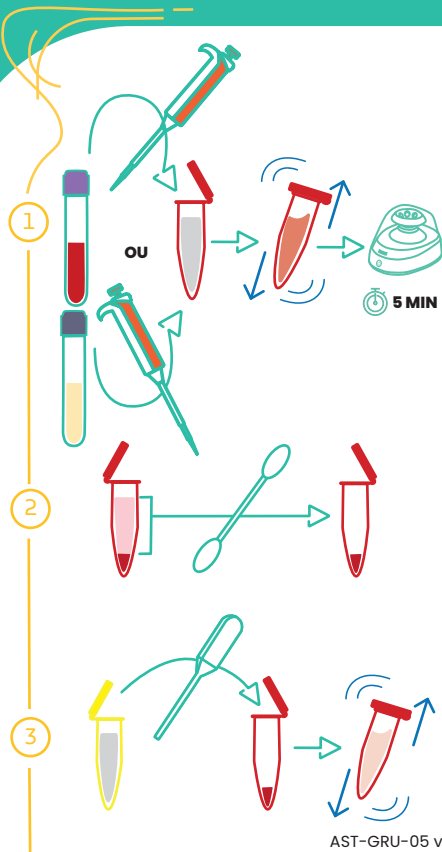

Prélever un volume de sang  
ou de liquide d'épanchement  
avec la **pipette orange** munie  
d'un cône à filtre et le  
transférer dans le **tube rouge**.




Agiter vigoureusement le  
**tube rouge** puis le centrifuger  
au moins 5 minutes.

Aspirer le surnageant du **tube  
rouge** à l'aide des deux  
extrémités du **saratige**.

Transférer l'intégralité du  
volume du **tube jaune** dans  
le tube rouge avec l'**albipette**.

Agiter vigoureusement le  
**tube rouge** afin de remettre  
le culot cellulaire en  
suspension.


4

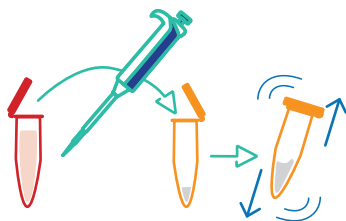

Prélever un volume du **tube rouge** à l'aide de la **pipette bleue** munie d'un cône à filtre.


Déposer ce volume dans le **tube orange** puis agiter vigoureusement.

5

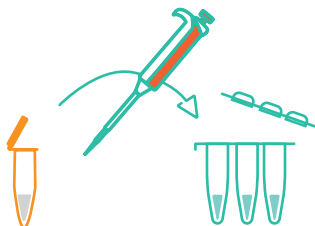

Déposer un volume du **tube orange** dans chaque **minitube** à l'aide de la **pipette orange** munie d'un cône à filtre.

6

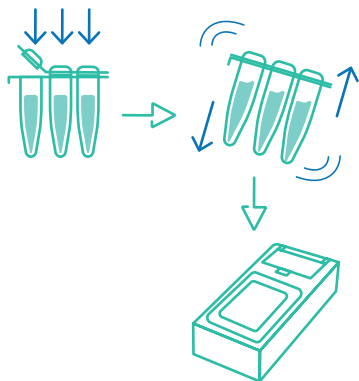

Bien fermer les **minitubes** puis agiter et faire redescendre toutes les gouttelettes au fond des tubes.

Insérer les **minitubes** dans l'analyseur (en plaçant le détrompeur à gauche) puis refermer immédiatement le capot de l'analyseur pour lancer l'analyse.



Ne jamais réouvrir les minitubes une fois la réaction démarrée, ni après la fin de celle-ci. Ne pas laisser les minitubes dans l'analyseur une fois la réaction terminée.

Se référer au manuel d'utilisation pour des informations plus détaillées :

Contact : +33 (0)1 73 21 78 21 • [service\\_client@enalees.com](mailto:service_client@enalees.com)



[bit.ly/manuel-fr-enalees](https://bit.ly/manuel-fr-enalees)