


**KURZANLEITUNG**



Schalten Sie das Gerät ein und wählen Sie das benötigte Programm.



Vergewissern Sie sich vor dem Öffnen des Röhrchens, dass sich die gesamte Flüssigkeit oder das Lyophilisat am Boden des Röhrchens befindet.

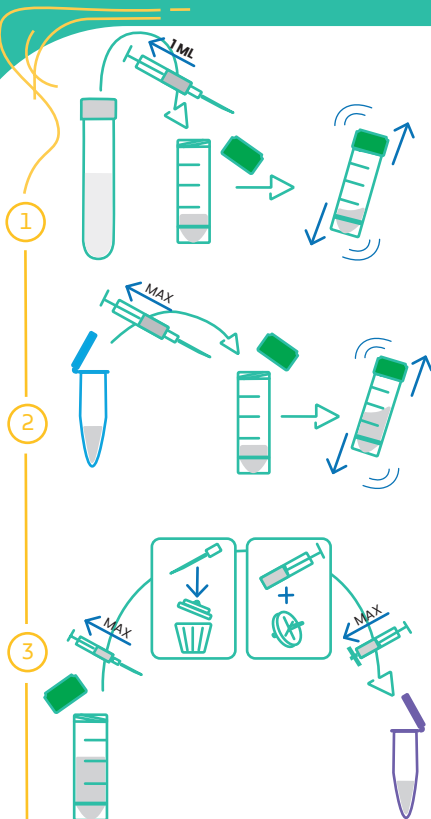

Setzen Sie die Nadel auf die **Spritze**. Nehmen Sie damit 1 ml der Spüllösung auf, entleeren Sie dann den Inhalt der **Spritze** in das **grüne Röhrchen** und schütteln Sie es kräftig.


Übertragen Sie den gesamten Inhalt des **blauen Röhrchens** mit der **Spritze** in das **grüne Röhrchen** und schütteln Sie es kräftig.

Entnehmen Sie mit der Spritze so viel Flüssigkeit wie möglich aus dem **grünen Röhrchen**. *Es ist nicht nötig, den gesamten zuvor gebildeten Schaum zu entnehmen.*

Entsorgen Sie die **Nadel** und versehen Sie die **Spritze** dem beigefügten **Filter**.

Setzen Sie den **Filter** in das **violette Röhrchen** ein und entleeren Sie den Inhalt der **Spritze** in das **violette Röhrchen**.

4

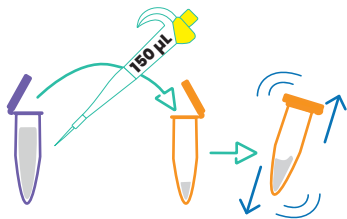


**Versehen Sie die benötigten Pipetten mit einer passenden Filterpipettenspitze.**

Entnehmen Sie mithilfe der **150 µL Pipette** dem **violetten Rührchen** die entsprechende Menge der Flüssigkeit.


Geben Sie die Menge in das **orangefarbene Rührchen** und schütteln Sie es kräftig.

5

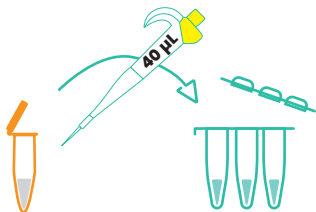

Entnehmen Sie mithilfe der **40 µL Pipette** dem **orangefarbenen Rührchen** die entsprechende Menge Flüssigkeit und geben Sie diese in jedes der **Minirührchen**.

6

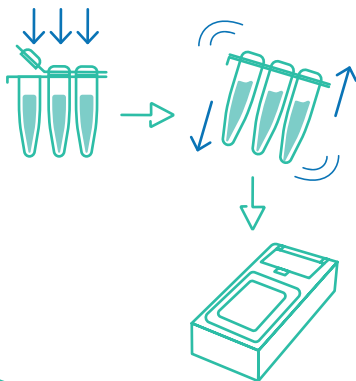

Verschließen Sie die **Minirührchen** mit einem hörbaren Klick und schütteln Sie diese kräftig.

Lassen Sie dann alle Tröpfchen zu Boden sinken und entfernen Sie etwaige Luftbläschen durch Klopfen.

Geben Sie die **Minirührchen** in das **Gerät** (platzieren Sie die Markierung links) und schließen Sie den Deckel des **Geräts**, um die Analyse zu starten.



Öffnen Sie die Minirührchen unter keinen Umständen, nachdem diese in das Gerät eingefügt wurden und die Analyse gestartet oder beendet ist. Lassen Sie die Minirührchen nicht in dem Gerät, sondern entfernen Sie diese, sobald die Analyse beendet ist.

Achten Sie auf die Hinweise im Benutzerhandbuch, um genauere Informationen zu erhalten:

Kontakt: +49 (0)2173 9935548 • kundendienst@enalees.com



bit.ly/manual-de-enalees