

## KURZANLEITUNG



Schalten Sie das Gerät ein und wählen Sie das benötigte Programm.



Vergewissern Sie sich vor dem Öffnen des Röhrchens, dass sich die gesamte Flüssigkeit oder das Lyophilisat am Boden des Röhrchens befindet.

### Versehen Sie die benötigten Pipetten mit einer passenden Filterpipettenspitze.


Tauchen Sie das für den Nasenabstrich verwendete Stäbchen in die Flüssigkeit, drehen Sie es in der Flüssigkeit hin und her und drücken Sie es beim Entfernen an der Innenwand des **grünen Röhrchens aus**.


Schütteln Sie das **grüne Röhrchen** kräftig.

Entnehmen Sie mithilfe der **150 µL Pipette** dem **grünen Röhrchen** die entsprechende Menge der Flüssigkeit.

Geben Sie die Flüssigkeit in das **orangefarbene Röhrchen** und schütteln Sie es kräftig.

Entnehmen Sie mithilfe der **40 µL Pipette** dem **orangefarbenen Röhrchen** die entsprechende Menge der Flüssigkeit und geben Sie sie in jedes der **Miniröhrchen**.

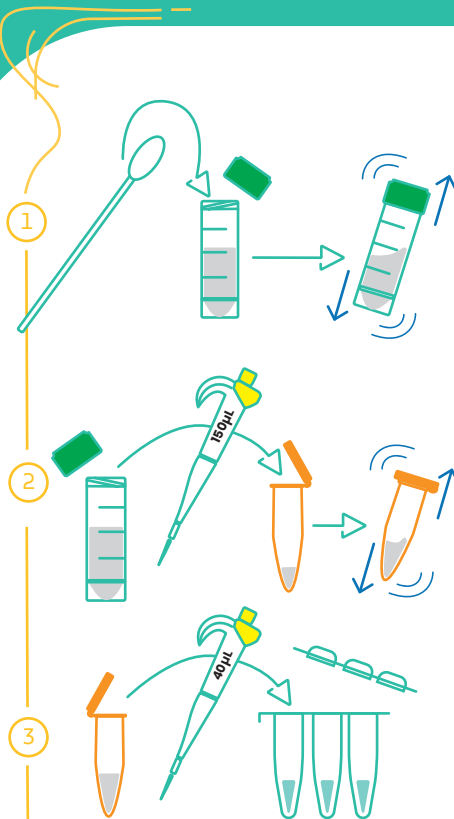

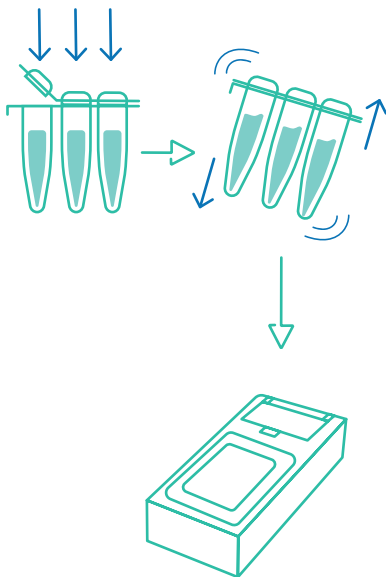

Verschließen Sie die **Miniröhrchen** mit einem hörbaren Klick und schütteln Sie diese kräftig.

Lassen Sie dann alle Tröpfchen zu Boden sinken und entfernen Sie etwaige Luftbläschen durch Klopfen.

Geben Sie die **Miniröhrchen** in das **Gerät** (platzieren Sie die Markierung links) und schließen Sie den Deckel des **Geräts**, um die Analyse zu starten.



Öffnen Sie die Miniröhrchen unter keinen Umständen, nachdem diese in das Gerät eingefügt wurden und die Analyse gestartet oder beendet ist. Lassen Sie die Miniröhrchen nicht in dem Gerät, sondern entfernen Sie diese, sobald die Analyse beendet ist.

Achten Sie auf die Hinweise im Benutzerhandbuch, um genauere Informationen zu erhalten:

Kontakt: +49 (0)2173 9935548 • kundendienst@enalees.com



bit.ly/manuel-de-enalees