


GUIDE RAPIDE D'UTILISATION



Allumer et programmer l'analyseur.




Avant ouverture des tubes, s'assurer que les liquides ou lyophilisats qu'ils contiennent sont bien au fond des tubes.

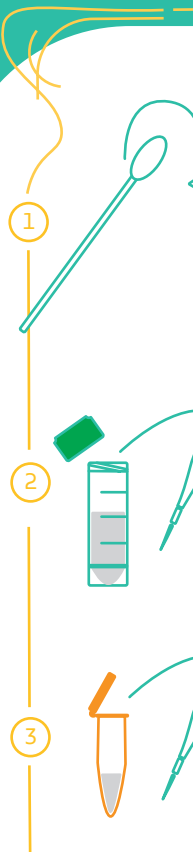

1


2

3

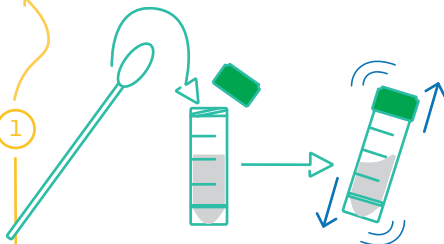


Immerger et faire tourner l'écouvillon une dizaine de secondes dans le **tube vert** avant de l'essorer contre la paroi du tube.

Agiter vigoureusement le **tube vert**.

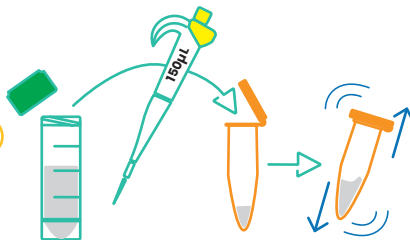


Prélever un volume du **tube vert** avec la **pipette de 150 µL** munie d'un cône à filtre.

Déposer ce volume dans le **tube orange** puis agiter vigoureusement.

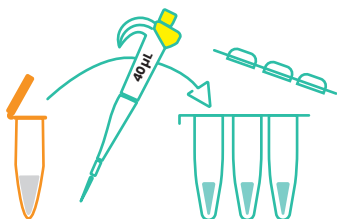

Déposer un volume du **tube orange** dans chaque **minitube** à l'aide de la **pipette de 40 µL** munie d'un cône à filtre.

4

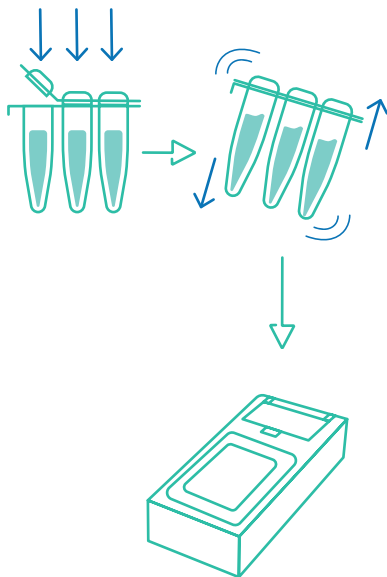

Bien fermer les **minitubes** puis agiter et faire redescendre toutes les gouttelettes au fond des tubes.

Insérer les **minitubes** dans l'analyseur (en plaçant le détrompeur à gauche) puis immédiatement refermer le capot de l'analyseur pour lancer l'analyse.



Ne jamais réouvrir les minitubes une fois la réaction démarrée, ni après la fin de celle-ci. Ne pas laisser les minitubes dans l'analyseur une fois la réaction terminée.

Se référer au manuel d'utilisation pour des informations plus détaillées :

Contact : +33 (0)1 73 21 78 21 • service_client@enalees.com



bit.ly/manuel-fr-enalees