

## KURZANLEITUNG



Schalten Sie das Gerät ein und wählen Sie das benötigte Programm.




Vergewissern Sie sich vor dem Öffnen des Röhrchens, dass sich die gesamte Flüssigkeit oder das Lyophilisat am Boden des Röhrchens befindet.




**Versehen Sie die benötigten Pipetten mit einer passenden Filterpipettenspitze.**

Geben Sie mithilfe der mit einem Filter versehenen Spitze der **orangefarbene Pipette** einen Teil der Flüssigkeit in das **rote Röhrchen**.

Schütteln Sie dieses kräftig. Lassen Sie das **rote Röhrchen** dann für 5 Minuten zentrifugieren.

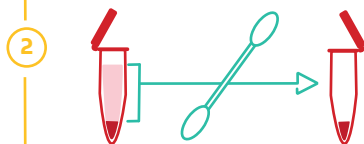


Nehmen Sie den flüssigen Überstand aus dem **roten Röhrchen** mithilfe beider Enden des **beigefügten Wattestäbchens auf**.

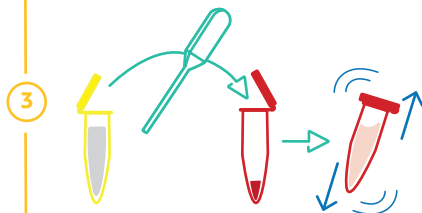

Geben Sie den gesamten Inhalt des **gelben Röhrchens** mithilfe der **beigefügten Plastikpipette** in das **rote Röhrchen**.

Schütteln Sie das **rote Röhrchen** kräftig, um das Zellpellet zu resuspendieren.


4

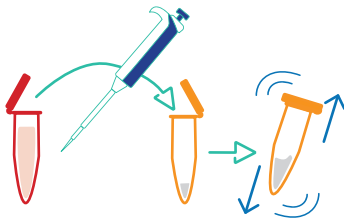

Entnehmen Sie mithilfe der **blauen Pipette** die entsprechende Menge der Flüssigkeit des **roten Röhrchens**.


Geben Sie diese Menge in das **orangefarbene Röhrchen** und schütteln Sie dieses kräftig.

5

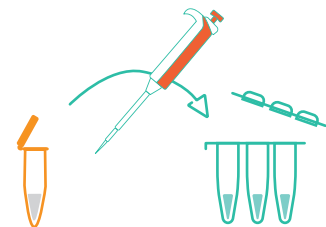

Entnehmen Sie mithilfe der **orangefarbenen Pipette** die entsprechende Menge der Flüssigkeit des **orangefarbenen Röhrchens** und geben Sie diese in jedes Miniröhrchen.

6

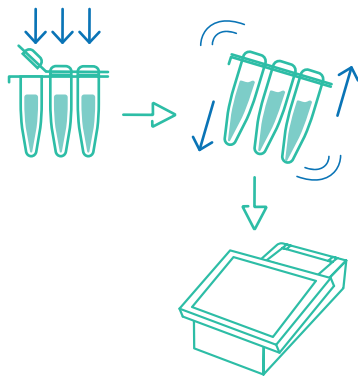

Verschließen Sie die **Miniröhrchen** mit einem hörbaren Klick und schütteln Sie diese kräftig.

Lassen Sie dann alle Tröpfchen zu Boden sinken und entfernen Sie etwaige Luftbläschen durch Klopfen.

Geben Sie die **Miniröhrchen** in das **Gerät** (platzieren Sie die Markierung links) und schließen Sie den Deckel des **Geräts**, um die Analyse zu starten.



Öffnen Sie die Miniröhrchen unter keinen Umständen, nachdem diese in das Gerät eingefügt wurden und die Analyse gestartet oder beendet ist.

Lassen Sie die Miniröhrchen nicht in dem Gerät, sondern entfernen Sie diese, sobald die Analyse beendet ist.

Achten Sie auf die Hinweise im Benutzerhandbuch, um genauere Informationen zu erhalten:

Kontakt: +49 (0)2173 9935548 • kundendienst@enalees.com



[bit.ly/manuel-de-enalees](https://bit.ly/manuel-de-enalees)